



Bedienungsanleitung

Treppenlift Modell HW 10/11



Inhalt

Allgemeine Beschreibung	3
Die Bedienung Ihres Treppenliftes	
- die Fahrinheit	4
- die Fernbedienung	5
Die Bedienelemente auf einen Blick	6
Optische Hinweise, Fehlerbehebung	7
Akustische Hinweise	8
Die Treppenliftpflege	
- durch den Benutzer	9
- durch Ihren Service Techniker	
Gewährleistung und Service	11

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Treppenliftes
Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit um sich mit den Funktionen
und der Bedienung Ihres Treppenliftes vertraut zu machen.**

1.1 Allgemeine Beschreibung

Das HAWLE Treppenlift Modell HW 10 dient zur Beförderung von Personen innerhalb und außerhalb von Gebäuden über eine oder mehrere Etagen. Ihr HAWLE Treppenlift ist so konzipiert, dass er sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite der Treppe angebracht werden kann.

Der HAWLE Treppenlift bietet Ihnen viele Vorzüge gegenüber den herkömmlichen Treppenliften. Wir bieten Ihnen ein Top Preis-Leistungsverhältnis, weil wir unsere Treppenlifte in unserer eigenen Produktionsstätte entwickeln und herstellen.

Platzsparend wird er an der Parkposition Ihrer Wahl zusammen geklappt und geparkt. Über die Fernbedienung kann Ihr Treppenlift zur gewünschten Startposition gerufen werden.

Auf Ihren Treppenlift bieten wir Ihnen eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Für Ihre Sicherheit haben wir den HAWLE Treppenlift mit Sicherheitssensoren ausgestattet so, dass er im Notfall die Fahrt sofort unterbrechen würde.

Wichtiger Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die blaue Kontrolllampe auf der Armlehne Ihres HAWLE Treppenliftes leuchtet, wenn Sie Ihren HAWLE Treppenlift in der Ladeposition parken. Sie signalisiert Ihnen, dass sich Ihr Treppenlift im Lademodus befindet. Anderen falls könnten sich die Akkus entladen und müssten kostenpflichtig ersetzt werden. Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Treppenliftes bitte nur dann aus der Steckdose, wenn Sie den Lift auch ausgeschaltet haben, da sich die Akkus sonst entladen.

Herzlichst Ihr

HAWLE-Treppenlifte-Team

Die Bedienung Ihres Treppenliftes:

Am Fahrstuhl

Wenn Sie Ihren HAWLE Treppenlift benutzen möchten, klappen Sie die Armlehnen und das Sitzpolster hinunter.

Durch betätigen des seitlich angeordneten Hebels (Abb. 3 – Bild 5) können Sie dann das Fußbrett (Abb. 3 – Bild 6) herunterklappen.

Nun ist Ihr HAWLE Treppenlift fahrbereit um Sie sicher in die von Ihnen gewünschte Etage zu befördern.


Starten Sie die Fahrt, indem Sie den Joystick (Abb. 3 – Bild 2) der sich an der Armlehne befindet, in die gewünscht Fahrtrichtung betätigen.

Drücken Sie diesen solange, bis Ihr HAWLE Treppenlift in die nächste Parkposition einfährt und selbstständig anhält.


Um Ihnen das Ein- bzw. Aussteigen zu erleichtern, haben wir Ihren Treppenlift (optional) mit einem elektrischen Drehsitz ausgestattet. Nun haben Sie die Möglichkeit, den Sitz über den Drehsitzschalters (Abb. 3 – Bild 3) heraus zu schwenken, um nach Beendigung Ihrer Fahrt, Ihren HAWLE Treppenlift sicher zu verlassen.

Nachdem Sie nun Ihre Fahrt beendet haben, schwenken Sie den Drehsitz mit Hilfe des Drehsitzschalters wieder in die ursprüngliche Position zurück (siehe unten).

Nun haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihren HAWLE Treppenlift platzsparend zu parken indem Sie das Fußbrett, die Sitzfläche und die Armlehnen hochklappen

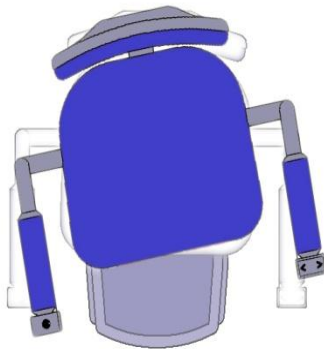

falsche Position
(Lift nicht fahrbereit)

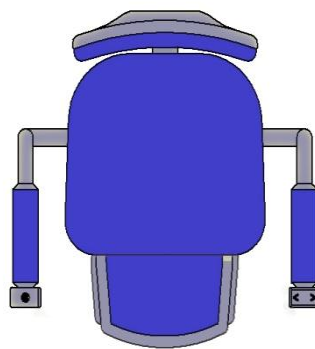

richtige Position
(Lift fahrbereit)

Abb. 1

Über die Fernbedienung

Das Anfordern Ihres HAWLE Treppenliftes in die gewünschte Startposition erfolgt durch das Betätigen des entsprechenden Fahrtrichtungstasters auf Ihrer Fernbedienung (Abb. 2).

Halten sie die entsprechende Taste gedrückt und Ihr HAWLE Treppenlift setzt sich in Bewegung und fährt nun in die gewünschte Park- und Ladestation und stoppt die Fahrt selbstständig an richtiger Stelle.

Um gegebenen falls die Batterie in Ihrer Fernbedienung zu wechseln, öffnen Sie die untere Abdeckung, auf der sich unser Logo befindet, nach unten. So können Sie die verbrauchte Batterie durch eine handelsübliche 9V Block - Batterie ersetzen.



Handsender können von der Abbildung abweichen.

Abb. 2

Die Bedienelemente auf einen Blick

Bild 1



Notausschalter
grüne LED

Bild 2



Joystick
blaue LED

Bild 3



Drehsitzschalter

Bild 4



Sicherheitsgurt

Bild 5



Fußbretthebel

Bild 6



Fußbrett

Abb. 3

Optische Hinweise

Die grüne Kontrolllampe

Die grüne LED (Abb. 3 – Bild 1) zeigt Ihnen die Betriebsbereitschaft Ihres HAWLE Treppenliftes an.

Sie leuchtet kontinuierlich, wenn sich der Betriebsschalter / Notausschalter (Abb.3 – Bild 1) und sich der Schlüssel im Schlüsselschalter (optional) in der „Ein“-Position befindet.

Der Betriebsschalter und der optional erhältliche Schlüsselschalter befinden sich auf der Vorderseite unterhalb der Sitzfläche Ihres HAWLE Treppenliftes. Der Lift ist eingeschaltet, wenn der Notausschalter nicht gedrückt ist.

Blinkintervalle und Fehlercodes

Sollte die grüne Leuchtdiode

- | | |
|-------------|--|
| 1 x blinken | Ladezustand der Batterie ist zu niedrig. So schnell wie möglich laden. |
| 2 x blinken | Lift fährt nicht. Batterie leer. Nachladen |
| 3 x blinken | Batterie ist überladen. Ladegerät evtl. ausstecken, Lift aus- und wieder einschalten. |
| 4 x blinken | Lift fährt nicht. Überlastungsschutz. Lift ausschalten und einige Minuten warten. |
| 5 x blinken | Lift fährt evtl. nicht. elek. Motorbremse funktioniert nicht korrekt. Informieren Sie ihren Servicedienst. |
| 6 x blinken | Lift fährt nicht. Joystick beim einschalten betätigt. Lift wieder aus- und einschalten |
| 7 x blinken | Lift fährt nicht. Fehler der elektronischen Laufüberwachung. Informieren Sie Ihren Servicedienst. |
| 8 x blinken | Lift fährt nicht. Motorfehler oder dessen Verkabelung. Bitte informieren Sie Ihren Servicedienst. |

Sollte die grüne Leuchtdiode nicht mehr leuchten, ist das ein Hinweis dafür, dass die Akkus leer sind, oder der Notausschalter betätigt ist!

Die blaue Kontrolllampe

Die blaue LED (Abb. 3 – Bild 2), die sich auf der Armlehne vor dem Joystick Ihres HAWLE Treppenliftes befindet, zeigt Ihnen an, daß sich Ihr HAWLE Treppenlift in der Parkstation befindet und die Akkus geladen werden.

Ist die blaue LED aus, kontrollieren Sie bitte ob das Netzteil/Ladegerät mit der entsprechenden Steckdose verbunden/angeschlossen ist.

Sie erlischt, sobald der Treppenlift aus der Parkstation heraus gefahren wird.

Akustischer Hinweis

Ihr Treppenlift verfügt über ein akustisches Warnsignal, dass dann ertönt, wenn sich Ihr Hawle Treppenlift nicht in der Parkposition befindet und somit die Akkus nicht geladen werden.

Sollten sich die Akkus in Ihrem Treppenlift durch eigenes Verschulden soweit entladen, dass sie nicht mehr reparabel sind, müssen wir sie kostenpflichtig ersetzen.

2.2 Zu Ihrer Sicherheit

- Bitte überprüfen Sie, ob sich die Armlehnen und der Sitz in der richtigen Position befinden (Abb. 1).
- Achten sie darauf, dass sich keine Hindernisse wie Kleidungsstücke oder Ähnliches auf der Fahrschiene befinden.
- Setzen Sie Ihre Füße auf das dafür vorgesehenen Fußbrett ab und positionieren Sie Ihre Arme / Hände auf den Armlehnen, damit Sie Ihren Treppenlift problemlos bedienen können.
- Führen Sie immer ein tragbares Telefon oder ein Notrufsystem mit sich, um im Falle einer Störung Hilfe holen zu können.

2.3 Vermeiden Sie bitte

- Fahrten im Stehen oder das Befördern von mehr als einer Person
- Das Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts
- Benutzung des Treppenliftes bei Brandgefahr
- Transport von sperrigen oder leicht entzündlichen Gegenständen
- Lassen Sie keinen Unbefugten oder unbeaufsichtigt Kinder fahren

3. Gewährleistung

Wir garantieren als Hersteller die einwandfreie Funktion Ihres HAWLE Treppenliftes während der Gewährleistungszeit. Die Gewährleistungszeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit Inbetriebnahme und Übergabe des HAWLE Treppenliftes.

Gewährleistungsanspruch besteht nur dann, wenn es sich bei der Fehlfunktion um eine nicht selbstverschuldete Störung bei sachgemäßem Umgang handelt.

Um größere Schäden bei einer Störung während der Gewährleistungszeit zu vermeiden, ist der Kunde verpflichtet, unseren Kundendienst unverzüglich zu informieren.

4. Die Pflege Ihres HAWLE Treppenliftes

4.1 Durch den Benutzer

Damit Sie möglichst lange Freude und einen einwandfreien Nutzen an Ihrem HAWLE Treppenlift haben, gehen Sie pfleglich mit Ihrem Treppenlift um. Ihr Treppenlift ist für den täglichen Gebrauch konzipiert. Die Fahrschiene sollte möglichst wöchentlich gereinigt werden. Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit der Zahnstange, die sich unter dem oberen Rohr befindet. Bei Bedarf können Sie die Sitzfläche Ihres Treppenliftes und die Fahrschiene mit einem feuchten Tuch abwischen, um Staub und evtl. Rückstände zu beseitigen.

4.2 Die Wartung durch Ihren persönlichen Servicetechniker

Sollten Sie sich nach Übergabe und Inbetriebnahme für unsere Wartungs – und Service Vereinbarung entscheiden, verlängert sich die Gewährleistung Ihres Treppenliftes automatisch auf 3 Jahre.

Gerne führen wir dann zum gewünschten Zeitpunkt regelmäßige Wartungen an Ihrem Treppenlift durch, um Ihnen Funktion und Sicherheit Ihres Treppenliftes zu gewährleisten und um möglichen Fehlern vorzubeugen. Hierbei werden alle wichtigen Bauelemente durch unser speziell geschultes Servicepersonal auf Funktionstüchtigkeit und Leichtlauf kontrolliert, gereinigt und gewartet. Alle relevanten mechanischen und elektrischen Sicherheitsausstattungen werden hierbei von uns überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht oder Instand gesetzt.

Falls dennoch eine Störung auftreten sollte, informieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Datum:

Service ausgeführt durch:

5. Entsorgung

Falls Ihr Treppenlift zu gegebener Zeit nicht mehr benötigt wird und entsorgt werden muss, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- die enthaltenen Akkus sind bleihaltig und müssen über den Sondermüll entsorgt werden.
- um eine Nachhaltigkeit zu ermöglichen sollte die verbleibende Treppenlift – Anlage dem Metallrecycling zugeführt werden.
- wir empfehlen, den kompletten Treppenlift über die Firma Hawle ausbauen und entsorgen zu lassen.